

Naam leverancier:



Handleiding

Mondo gasveer



Medross Rehab B.V.
Dommelstraat 6B
5347 JL OSS
Telefoon: 0412 – 46 51 16
Fax: 0412 – 46 51 17
E-mail: info@medross.nl
Internet: www.medross.nl

CE VERKLARING

Hiermee verklaart de fabrikant dat de trippelstoel op grond van haar concipiering en constructie en in de door hem in omloop gebrachte uitvoering, beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de EG richtlijnen.

Na een wijziging van het hulpmiddel, die niet in overleg met de fabrikant wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring haar geldigheid.

De richtlijn Nr. 93/42/EEG van de raad van de Europese gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen.

Het besluit medische hulpmiddelen <staatsblad KdN 1995-243>.

De trippelstoel wordt voorzien van een CE logo, het adres van de fabrikant en een identificatienummer.

INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
Voorwoord	2
Inleiding	3
Het instellen van de rugleuning	4
Het instellen van de zitdiepte	4
Het instellen van de zithoek	5
Het instellen van de zithoogte	6
Het instellen van de remhandel	7
Het instellen van de armleuningen	8
Instructies voor het onderhoud	9
Garantiegegevens	10
Instructie voor veilig gebruik, waarschuwingen	11
CE verklaring	12

VOORWOORD

Beste gebruiker,

Mogen wij u geluk wensen met het verwerven van een Medross Rehab BV kwaliteitsproduct. Deze producten hebben hun betrouwbaarheid en kwaliteit door de jaren heen bewezen.

U bent nu gebruiker geworden van een hoogwaardig hulpmiddel, waarvan wij weten dat u er vele jaren gemak en plezier van zult hebben.

Deze handleiding voor gebruik en onderhoud zal u bekend maken met uw Mondo gasveer trippelstoel. Wij raden u aan deze handleiding in zijn geheel door te lezen alvorens u de Mondo gasveer trippelstoel in gebruik neemt. In deze handleiding vindt u beschreven hoe u de Mondo gasveer trippelstoel optimaal kunt gebruiken en onderhouden.

Mocht u na het doornemen van deze gebruikershandleiding nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met uw leverancier.

INSTRUCTIE VOOR VEILIG GEBRUIK, WAARSCHUWINGEN

Houdt u aan de instructie zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

Gebruik, anders dan het voorgeschreven of beoogde gebruik, zoals bijvoorbeeld het gaan zitten op de armleuning, wordt afgeraden.

De bekleding van de stoel is niet bestand tegen scherpe voorwerpen.

Bij het gaan zitten in of opstaan uit de stoel dient de stoel op de rem te staan.

Monteer alleen originele accessoires. Bij gebruik en/of montage van niet originele accessoires vervalt de garantie geheel of ten dele.

Indien draaiknoppen, inbusbouten of handels worden losgedraaid, om bijvoorbeeld de armleggerhoogte te veranderen, dienen deze na de verstelling weer goed te worden vastgedraaid.

Indien u klachten heeft aan uw trippelstoel, schakel dan de leverancier in. De garantie vervalt bij onoordeelkundig gebruik.

GARANTIEGEGEVENS

Medross Rehab BV geeft de volgende garanties aan de eerste koper:

Materiaal en constructie fouten	60 maanden
Stoffering	12 maanden
Wielen	12 maanden
Mechaniek	12 maanden

De genoemde termijnen gelden vanaf de datum van de eerste levering aan de gebruiker. De garantie vervalt, indien aan het hulpmiddel reparaties zijn verricht of wijzigingen zijn aangebracht door anderen dan de fabrikant, dan wel de gemachtigde dealer.

De garantie vervalt tevens indien er sprake is van:

- * onoordeelkundig, onjuist of abnormaal gebruik
- * onachtzaamheid
- * verwaarlozing
- * enige vorm van geweld
- * Ander gebruik en/of onderhoud dan in de gebruiksaanwijzing is voorgeschreven.

De leverancier zal, waar nodig, onderdelen vervangen en/of reparaties uitvoeren, mits deze onder de garantiebepalingen vallen.

INLEIDING

Deze Mondo gasveer trippelstoel bestaat uit onderling uitwisselbare componenten. Hierdoor kan een stoel voor u op maat gemaakt worden met standaard componenten, c.q. aanpassingen. De trippelstoel is ontworpen voor gebruik binnenshuis.

Reparaties en het verrichten van aanpassingen aan de Medross Rehab BV producten, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die door ons zijn geautoriseerd.

De stoel zal in overleg met u worden ingesteld door de geautoriseerde persoon, die de stoel bij u aflevert.

Waarschuwing vooraf:

De trippelstoel is bedoeld voor maximaal één persoon.

Zorg dat de trippelstoel altijd op de rem staat bij het gaan zitten/opstaan, als ook bij het instellen van de hoogte.

Men dient direct en rustig plaats te nemen op de zitting.

Het maximale gebruikersgewicht is 125 kg.


Zorg voor voldoende ruimte om te bewegen met de stoel.

Controleer of de stoel niet breder is dan uw huisdeuren.

HET INSTELLEN VAN DE RUGLEUNING

De rugleuning wordt bij aflevering los meegeleverd in de doos.

Plaats de stang van de rugleuning in de hiervoor bestemde uitsparing (1) achter de zitting. Schuif de stang naar beneden, totdat de gewenste hoogte-instelling is bereikt. Over het algemeen zal dat de hoogte-instelling zijn, waarbij de bolling van de rugleuning ter hoogte zit van de natuurlijke holte van de rug, iets boven het bekken. Let erop dat de rugstang niet te laag zit, zodat deze bij het zakken van de zitting tegen de remstang kan komen. Draai knop (2) aan, zodat de rugleuning vast komt te zitten.

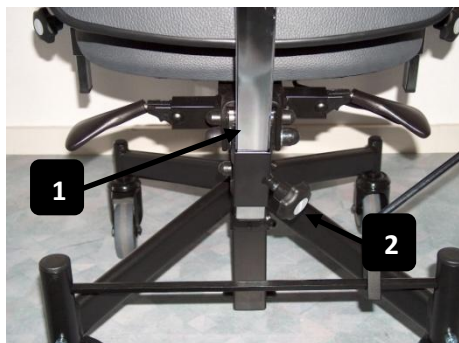

HET INSTELLEN VAN DE ZITDIEPTE

De zitdiepte van de stoel stelt u als volgt in:

Duw de linker handel (3) naar beneden en beweeg de rug naar voren/achteren, totdat de juiste zitdiepte is bereikt. Trek dan de handel (3) weer naar boven in de oorspronkelijke stand. De ingestelde zitdiepte is nu gefixeerd.



INSTRUCTIES VOOR HET ONDERHOUD

Controleer regelmatig of uw trippelstoel nog wel optimaal functioneert. Let hierbij op de volgende punten:

Rem

Functioneert de rem goed. Zo niet, raadpleeg uw leverancier.

Bekleding

De stoel is met een brandwerende stof bekleed. De stof is luchtdoorlatend en ademt dus. Vlekken kunt u verwijderen met handwarm water. Het synthetisch softleder Bison is geen skai.

Frame

De metaaldelen kunt regelmatig reinigen met een vochtige doek.

Wielen

Verwijder regelmatig stof e.d. die tussen de draaiende gedeelten van het wiel gaan zitten.


Bevestigingen

Kijk minimaal eenmaal per maand alle draaiknoppen na. Controleer hierbij of ze nog goed vastzitten.

HET INSTELLEN VAN DE ARMLEUNINGEN


Hoogte instelling:

Draai knop (A) los. Schuif de verticale metalen buis (B) naar boven of naar beneden, totdat de armleuning op de door u gewenste hoogte staat. Draai nu knop (A) weer vast. Herhaal dit aan de andere kant.

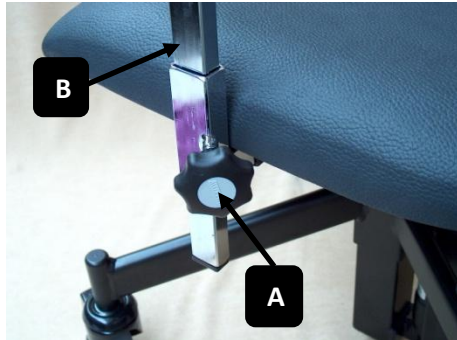

Breedte instelling:

Draai knop (C) los. Schuif nu de armleuning naar binnen of buiten, totdat de gewenste instelling bereikt is. Draai nu knop (C) weer vast. Herhaal dit aan de andere kant.

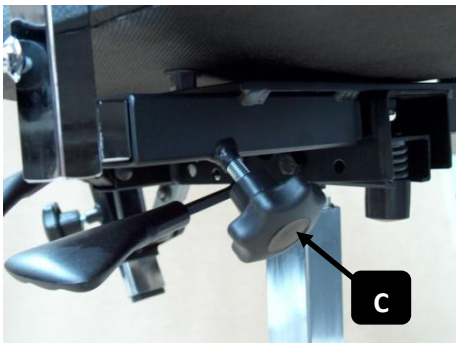

HET INSTELLEN VAN DE ZITHOEK

De zitting heeft een variabele zithoek, zowel voorover als achterover, waardoor deze zithoekverstelling ook uitstekend is te gebruiken als een extra hulp bij het opstaan.

Om de zithoek te verstellen trekt u de handgreep rechtsachter (4) naar boven. U kunt nu, door de voorzijde van de zitting naar boven/ beneden te bewegen, de zitting in de juiste stand instellen. Als u de juiste stand heeft gevonden, laat u de handgreep (4) los zodat de zitting gefixeerd wordt. Bij het opstaan, kunt u deze handel naar boven trekken. De stoel kantelt dan naar voren en vergemakkelijkt het opstaan.

Let erop dat de stoel bij het opstaan op de rem staat!



HET INSTELLEN VAN DE ZITHOOGTE

De zithoogte is instelbaar door middel van een gasveerverstelling.

Het verhogen van de zithoogte:

Het mechanisch verhogen van de zithoogte is alleen mogelijk als u niet in de stoel zit.

Trek de voorste handgreep (5) aan de rechterkant omhoog. De gasveer van de stoel wordt nu ontkoppeld en de zitting zal omhoog gaan. Zodra de stoel de juiste stand bereikt heeft, laat u de handgreep los. De stoel is nu gefixeerd op de ingestelde hoogte.



Het verlagen van de zithoogte:


Trek de handgreep (5) omhoog, terwijl u gewoon op de stoel zit. Door middel van uw lichaamsgewicht zal de zitting nu naar beneden gaan. Zodra u de gewenste zithoogte heeft bereikt, laat u de handgreep los. De stoel is nu gefixeerd in de juiste hoogte.

HET INSTELLEN VAN DE REMHAMDEL

De achterste wielen van de trippelstoel zijn voorzien van een centrale beremming. De remhandel kan verplaatst worden in de breedte en is zowel links als rechts te bedienen.

Links/rechts instelling:

Draai de inbusbout (B) los. U kunt nu de remhandel zwenken. Draai inbusbout (A) los. Schuif het remblokje naar de kant die u wilt hebben en draai weer vast. Zwenk de remhandel voor u in de juiste stand en draai inbusbout (B) weer vast.

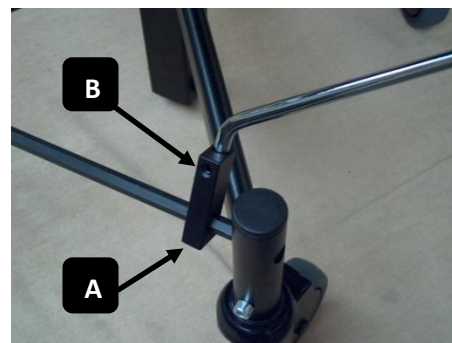

Breedte instelling:

Draai de inbusbout (A) los. Schuif nu de remhandel naar links of rechts, totdat hij vrij langs de armlegger kan bewegen. Draai nu de inbusbout weer vast. De werking van de rem is het meest optimaal, als de stoel op een vlakke ondergrond staat. Een oneffen ondergrond kan de remwerking ernstig verminderen.

BELANGRIJK:

Zet, alvorens u gaat zitten/staan of de stoel in hoogte verandert, de stoel altijd eerst op de rem!