

Bloedsuikermeter MediTouch

BEKNOPTE HANDLEIDING



NL
Art. 7926

CE 0483



WAARSCHUWING

Als u de bloedsuikermeter MediTouch van MEDISANA voor de eerste keer gebruikt, leest u de gebruikershandleiding grondig door. De beknopte handleiding is bedoeld voor gebruik nadat u de functies en de werkwijze van het toestel en toebehoren goed onder de knie hebt. Alle onderdelen van de bloedsuikermeter kunnen met bloed in contact komen en daardoor dus een mogelijke bron van infectie vormen.

1 Instellen van datum en uur (eerste instelling)

2 Aanbrengen van de lancet in de prikhuip

3 Bloedsuikertest uitvoeren

4 Oproepen en verwijderen van testresultaten

5 Display-signalen en fouten verhelpen



1. Als u een accu aanbrengt, wordt het toestel automatisch ingeschakeld.



2. De beide laatste eenheden van het jaartal knippen op de display. Druk op om het jaartal in te voeren en druk op om de invoer te bevestigen.




3. Herhaal stap 2, om tijd en datum in te stellen. Het gedeelte waarin u iets wilt gaan instellen knipt u lekens.


2 Aanbrengen van de lancet in de prikhuip




1. Was uw handen met zeep en warm water. Grondig afspoelen en drogen. Indien nodig kunt u het huidplekje waar bloed zal worden afgenomen met een alcohol-pad reinigen.

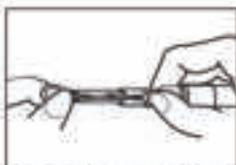

2. Open de prikhuip, door de beschermkap in de richting van de klok te draaien en te verwijderen. Breng de lancet tot het stopstreepje (zonder deze daarbij te draaien) in de prikhuip aan.

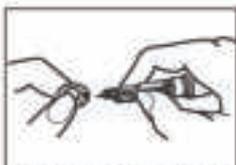


3. Draai het beschermhulpetje voorzichtig van de lancet af.

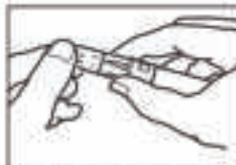

4. Zet de beschermkap weer op de prikhuip en draai deze tegen de richting van de klok in (veel te vast) vast. Bij gebruik van de AST-dop leest u de gebruikershandleiding door (vanaf p. 21).




5. Stek de prikdepte die voor u geschikt is, zoals beschreven in de gebruikershandleiding (p. 18).

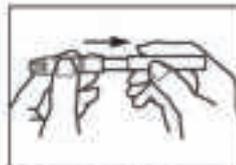

6. Span de prikhuip, door deze uit elkaar te trekken tot deze zich met een 'klik' vastklikt. Als deze niet vastklikt betekent dit dat deze waarschijnlijk reeds bij het inzetten van de lancet gesperren is.

3 Bloedsuikertest uitvoeren

De prikhuip is klaar voor gebruik. Niet in de vingers prikken voordat de meter en de teststrip goed voorbereid zijn.

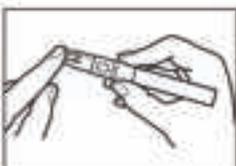


X. Als de meter en de teststrip klaar voor gebruik zijn en het huidplekje schoongemaakt is, brengt u de prikhuip naar de vingertop toe (het beste aan de zijkant) en drukt u op de druktoets.

Door zachtjes op het plekje te masseren, krijgt u een bloeddruppeltje. Let op dat het bloeddruppeltje niet uitgesmeerd wordt en voor de test uit, zoals beschreven in het volgende gedeelte.



1. Breng de teststrip in de zijrichting in het toestel aan. Het symbool verschijnt automatisch.

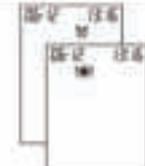


2. Druk op om (voor het eten) of (na het eten) in te stellen en druk op om uw invoer te bevestigen.



3. Als het bloeddruppel-symbool op de display knipt, neemt u een druppeltje bloed van uw vingertop (zoals in gedeelte 2 wordt beschreven).
4. Het plekje zacht masseren om de bloedcirculatie te stimuleren.

3 Bloedsuikertest uitvoeren


3 Bloedsuikertest uitvoeren /
4 Oproepen en verwijderen van testresultaten

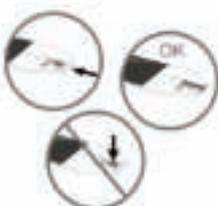

- Breng een druppeltje aan op het bloedopname-punt op het einde van de teststrip.
- Breng geen bloed aan op de bovenkant van de teststrip.




- Als door de reactiecel van de teststrip voldoende bloed is opgenomen, hoort u een piepsignaal. Na ca. 5 seconden verschijnt dit op de display.

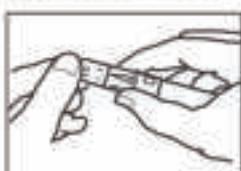

- Open de prikhelp opening, door de beschermddop met de wijsers van de klok mee te draaien en eraf te halen. Verwijder de gebruikte lancet, zoals beschreven in de gebruikershandleiding (p. 26).



- Werp de lancet zorgvuldig weg om verwondingen aan andere personen te vermijden. Breng de beschermddop weer aan op de prikhelp en draai deze tegen de klok in vast.

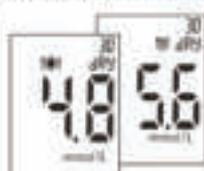

- Schakel het toestel aan, door ca. 3 sec. de -toets in te drukken.

- Druk , om de gemiddelde waarde van de met of opgeslagen testresultaten van de voorbije 30 dagen op te roepen.

4 Oproepen en verwijderen van testresultaten




- Druk , om opeenvolgend alle opgeslagen testresultaten in de volgorde van 360 tot 001 op te roepen, d.w.z. de recentste invoer wordt als eerste getoond en de oudste het laatste.




- Om een testresultaat te verwijderen, druk gedurende 3 seconden en de display toont "DEL".
- Druk , om de volgende invoer te tonen.

- Als u niet op een volgende toets drukt, schakelt het toestel na ca. 2 minuten automatisch uit.

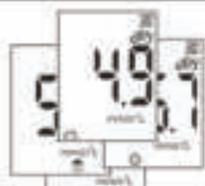

- Druk , om de gemiddelde waarde van de met of opgeslagen testresultaten van de voorbije 30 dagen op te roepen.

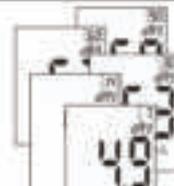

- Druk , om de gemiddelde waarde van de voorbije 7, 14, 30, 60 of 90 dagen te tonen.



- Druk om terug naar te gaan.
- Als u niet op een volgende toets drukt, schakelt het toestel na ca. 2 minuten automatisch uit.

5 Display-signalen en fouten verhelpen



- Oorzaak** Vochtige/gebruikte teststrips
Oplossing Een nieuwe teststrip gebruiken



- Zwakke accu**
Vervangen door een nieuwe accu.



- Systeemfout**
Eerst een nieuwe accu plaatsen. Als opnieuw fout 001 getoond wordt, dan neemt u contact op met de service-desk.



- Testresultaat is hoger dan 33,3 mmol/L.**
Herhaal de test. Als het resultaat niet verandert, neemt u dan contact op met uw arts.



- Testresultaat ligt tussen 3,3 en 1,1 mmol/L.**
Het symbool voor Hypoglycemie (lage bloedsuikerspiegel) verschijnt. Neem contact op met uw arts.



- Testresultaat is lager dan 1,1 mmol/L.**
Herhaal de test. Als het resultaat ongewijzigd blijft, neemt u dan contact op met uw arts.



- "Ht" / "Lt" verschijnt.** Temperatuur is te hoog of te laag, d.w.z. niet binnen het bereik van de noodzakelijke 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). De gebruiker wordt geadviseerd voor een mogelijk foutief testresultaat, indien de test uitgevoerd wordt. Gebruik de meter op een plaats met een temperatuur tussen 10 °C en 40 °C (50 °F - 104 °F).



MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Deutschland
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Service-adres:

Medisana Benelux NV, Euregiopark 30
NL-6467 JE Kerkrade, Nederland
Tel: 00 31 45 5470800
e-mail: Info@medisana.nl
Internet: www.meditouch.eu