
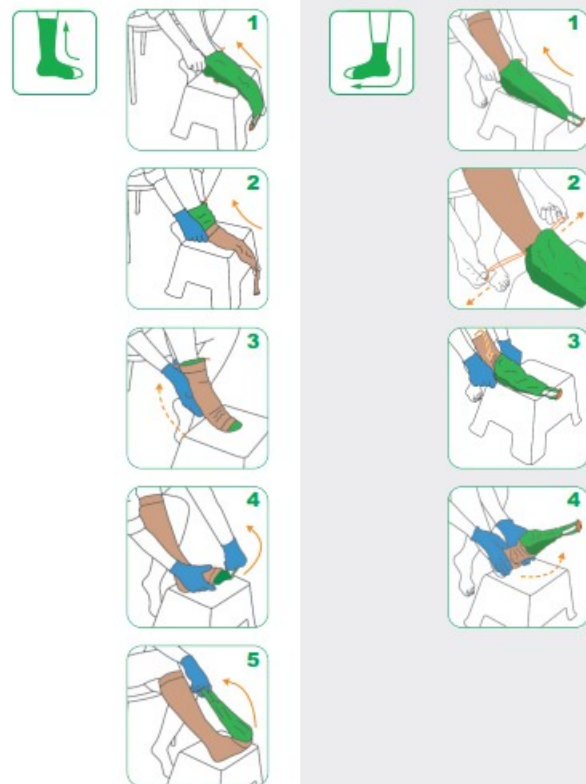


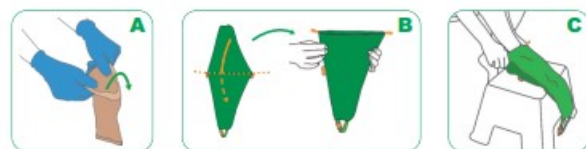

Arion Sim-Slide®

Aan- en uittrekhelp voor medische compressiekousen met open teenstuk

Belangrijke informatie voordat u het product gaat gebruiken:

- A. Nuttige tips:**
- Draag speciale antisliphandschoenen bij het gebruiken van het product. Daardoor heeft u maximale grip op de steunkous en is er minder fysieke kracht nodig.
 - Heeft de steunkous een siliconen rand? Draai die dan naar buiten.
- B. Zorg ervoor dat het product klaar is voor gebruik:**
- Vouw de extra stof terug in de "groene glijzak"
 - Lijn de vouwlijn uit met de bovenkant van de oranje labels
- C. Heeft u moeite om bij uw tenen te komen? Plaats dan uw voet op een krukje om te voorkomen dat u te ver voorover moet buigen.**



Aan

Aantrekken:

1. Plaats de Sim-Slide® over de voet. Om te voorkomen dat de Sim-Slide® van de voet glijdt, trekt u losjes aan de oranje pullers
2. Trek de kous aan over de Sim-Slide®
3. Schuif de kous over de voet, zodat de hiel van de kous op de juiste plaats zit
4. Leg één hand stevig op de hiel en trek met de andere hand aan de lus van de Sim-Slide®
5. Trek de Sim-Slide® met kleine bewegingen uit de kous



Uit

Uittrekken:

1. Schuif de Sim-Slide® over de kous
2. Trek stevig aan de oranje pullers zodat de Sim-Slide® wordt gefixeerd vlak boven de enkel
3. Vouw de kous zo ver mogelijk over de Sim-Slide®
4. Schuif de kous en de Sim-Slide®, te beginnen bij de hiel, met kleine bewegingen van de voet

Bekijk onze video-instructies op uqr.to/SimNL

MAATVOERING

REF	Maat	Schoenmaat EU	Schoenmaat UK dames	Schoenmaat UK heren	Schoenmaat US dames	Schoenmaat US heren
E0SL01	Small	≤ 34 - 36	≤ 1 ^{1/2} - 3 ^{1/2}	≤ 2 ^{1/2} - 4	≤ 4 - 6	3 - 4 ^{1/2}
E0SL02	Medium	37 - 38,5	4 - 5 ^{1/2}	4 ^{1/2} - 6	6 ^{1/2} - 8	5 - 6 ^{1/2}
E0SL03	Large	39 - 41	6 - 7	6 ^{1/2} - 7 ^{1/2}	8 ^{1/2} - 9 ^{1/2}	7 - 8
E0SL04	Extra large	≥ 42	≥ 7 ^{1/2}	≥ 8	≥ 10	≥ 8 ^{1/2}

U kunt onze instructievideo bekijken op: uqr.to/SimNL of deze QR-code scannen:



Aanvullende informatie kunt u vinden op www.slide-solutions.com

Sim-Slide® van Arion Slide Solutions minimaliseert de wrijving tussen de steunkous en de huid dankzij de unieke glij-eigenschappen van het speciale materiaal waarvan het product is gemaakt, en de coating. De geringere wrijving is vooral handig om de steunkous over het breedste deel van de voet, de hiel, te schuiven.

GEMAKKELIJKE, VEILIGE EN EENVOUDIGE OPLOSSING

- Vermindert de fysieke belasting voor zowel dragers van steunkousen als zorgverleners
- Kan bijdragen aan een langere levensduur van de steunkous en aan het langer behouden van de oorspronkelijke compressiewerking door beschadiging door vingers of nagels te voorkomen en te ver uittrekken en vervormen van de steunkous te verminderen
- Bevordert de zelfredzaamheid van dragers van steunkousen en stimuleert het gebruik ervan

SAMENSTELLING

- Product: polyamide 92%, polyurethaan 3%, silicone 2%, polyester 2%, rubber 1%
- Verpakking: polypropyleen (PP)

CONTRA-INDICATIES

- Het product niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de componenten (zie samenstelling).
- Voor het gebruik van het product moeten open wonden worden afgedekt met een geschikt verband.

WAARSCHUWINGEN

- **Verstikkingsgevaar:** houd het product uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren.
- **Gevaar voor uitglijden:** niet op het product stappen. Erg glad materiaal.
- **Uitsluitend voor uitwendig gebruik/bedoeld voor huidcontact.** Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

BELANGRIJK

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw leverancier.
- Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing zolang u het product gebruikt.
- Meld alle ernstige incidenten die zich voordoen bij het gebruik van het product aan de fabrikant en de bevoegde toezichhoudende instantie.
- Het is belangrijk om bij het gebruik de juiste maat van het product voor de betreffende gebruiker te kiezen. Als een verkeerde maat wordt gebruikt zal het product niet correct werken en mogelijk beschadigen of overmatig snel slijten. De juiste maat is afhankelijk van uw schoenmaat.
- Gebruik het product exclusief voor een bepaalde persoon. Moet het product voor meer dan een persoon worden gebruikt? Desinfecteer het product dan voor gebruik met een 70% ethanoloplossing.

BEWAREN

Uit te buurt houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Met de hand wassen op max. 30 °C/86 °F.
- Niet bleken.
- Niet drogen in een wasdroger. Droog het product uitsluitend af met een handdoek.
- Niet strijken.
- Niet chemisch reinigen.
- Kan worden gedesinfecteerd met een 70% ethanoloplossing.

GARANTIE

Dit product wordt gegarandeerd tegen defecten die het gevolg zijn van defecte materialen of fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode wordt het product bij fabricage- en/of materiaal fouten kosteloos vervangen. Producten worden onder garantie alleen vervangen als met een aankoopbewijs kan worden aangetoond dat de datum waarop de klacht is ingediend binnen de garantietermijn valt. De garantie is niet van toepassing als het defect het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het product, of van gebruik bij verschillende personen. Neem voor vragen over garantie contact op met uw leverancier. We vragen u het product gewassen terug te sturen en de onderhoudsinstructies op te volgen.

AANBEVELING VOOR GEBRUIK

De fabrikant adviseert om het product, als het regelmatig wordt gebruikt, zes maanden na het eerste gebruik te vervangen. U kunt de datum van het eerste gebruik op de achterkant van dit document noteren.