



Bedpan RFM roestvrij staal incl. deksel

Gebruiksaanwijzing



Bedoeld gebruik

Voor ondersteuning bij patiënten die het bed niet kunnen verlaten, bij tijdelijke of langdurige bedlegerigheid. Hij dient voor de veilige opname van ontlasting- en urine-uitscheidingen. Ook geschikt voor personen die in de nacht niet alleen kunnen opstaan en als er valgevaar is.

Indicatie

Gebruik van de bedpan is nuttig bij strikte bedrust, na operatieve ingrepen of bij beentrombose, evenals bij bewegingsbeperkingen bijvoorbeeld als gevolg van een apoplexie.

Gebruik (dit wordt ondersteund door verplegend personeel)

Voor het gebruik wordt de bedpan evt. gestabiliseerd door een handdoek zodat deze niet wegglijdt. Vanwege de verschillende ziektebeelden moet erop worden gelet dat de bedpan vanaf de juiste zijde onder het bekken wordt geschoven.

Als de patiënt een beroerte heeft, moet de bedpan vanuit de “getroffen” zijde onder het bekken worden geschoven. Bij een fractuur van de dij of bij een kunstheup, wordt de bedpan vanuit de intacte/gezonde lichaamszijde onder het bekken geschoven.

1. De patiënt draait zich met gebogen benen op de zij, evt. met behulp van het verplegende personeel. De bedpan wordt in een positie tegen de billen aangebracht, zodat deze bij het terugdraaien op de juiste plek tussen de intieme zone en het bed is geplaatst. De gebogen benen dienen bij het terugdraaien als hendel. Het verplegende personeel kan de correcte plaatsing controleren; de greep moet naar buiten wijzen.

OF

2. De patiënt plaatst de benen als een brug en trekt zich met de opstahulp een klein beetje naar boven, zodat de billen van het bed afkomen. De bedpan wordt nu van voren onder de billen geschoven. Hierbij moet erop worden gelet dat het heiligbeen van de patiënt op de rand van de bedpan ligt. Evt. kan de rand met een kleine handdoek worden bekleed en/of de positie van de bedpan met een kleine handdoek worden aangepast.

Aanwijzing: een licht verhoogde positie van het bovenlichaam vergemakkelijkt de uitscheiding. Bij mannelijke patiënten moet tegelijkertijd een urinefles worden gebruikt. Vrouwelijke patiënten moeten hun benen strekken om het wegstromen van de urine in het bed te vermijden.

Nadat de bedpan is verwijderd door dezelfde verpleegkundige die hem heeft geplaatst, moet deze met het deksel worden gesloten en buiten bereik van het bed en/of de patiënt worden neergezet om letsel en vervuiling te vermijden. In geen geval mag de bedpan gewoon onder de billen worden uitgetrokken. Dit kan leiden tot verwondingen. Na het gebruik wordt de bedpan volledig gelegeerd.

Contra-indicatie

Het gebruik van de bedpan is niet geschikt bij een zeer hoog gevaar voor decubitus en bij personen met een dwarslaesie. Bij een sterk evenwichtsverlies, verlammingen en ernstige pijn in de rug en billen is het gebruik van de bedpan gecontra-indiceerd.

Reiniging en desinfectie bij klinisch gebruik

De bedpan moet volledig worden gelegeerd voordat deze en het deksel worden gereinigd en gedesinfecteerd. Bij klinisch gebruik moet hiervoor een bedpan reinigings- en desinfectietoestel worden gebruikt.

Reiniging en desinfectie bij huishoudelijk gebruik

De bedpan moet volledig worden gelegeerd. Daarna moeten de bedpan en het deksel worden gereinigd met een zeepoplossing en vervolgens worden afgespoeld. Bij de reiniging moet erop worden gelet dat er geen resten meer zichtbaar zijn. Daarna droogt u beide onderdelen met een zachte doek. Daarna worden beide onderdelen met een algemeen beschikbaar desinfectiemiddel, bijv. Descosept AF, ingewreven. Spoel het desinfectiemiddel niet met water af en laat de onderdelen aan de lucht drogen. Aanwijzing: Houd u aan de gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen van de fabrikant van het desinfectiemiddel.

Materiaal/eigenschappen/levering

Bedpan en deksel moet knop, materiaal: 100% roestvrij staal, maximale belastbaarheid: 150 kg
Afmetingen: Diameter ca. 30 cm, diameter van de opening ca. 21 cm, greeplengte ca. 12 cm, hoogte ca. 9 cm,

Gewicht: ca. 1 kg

Inhoud ca. 2 l

Kan voor sterilisatie met autoclaaf worden behandeld tot 130 °C

Aanwijzing: Bescherm de bedpan tegen direct zonlicht en bewaar hem op een droge en donkere plek.

HMV:19.40.04.0032, PMV: 51.40.01.0034



Daimlerstrasse 12 a, 25337 Elmshorn
Tel.: 04121 473312, Fax: 04121 473323, www.rehaforum.com



Art. 08480212