

Inhoudsopgave

Voorwoord	33
Verklaring van overeenstemming	33
Levensduur	33
Verwijdering	33
Typeplaatje	33
Hergebruik	33
Garantie	33
Toegepaste normen	33
Onderdelen van het product	34
Beoogd doel	35
Indicatie contra-indicatie	35
Geleverd product	35
Veiligheidsinstructies	35
Vervoer	36
Klaarmaken voor gebruik	37
Wielen aanbrengen en uitvouwen	37
Voetsteunen aanbrengen	37
Lengte-instelling van de voetsteunen	37
Zithoogte instellen (wielophanging achter)	37
Zithoogte instellen (wielophanging voor)	37
Armleuningen instellen en verwijderen	37
Parkeerrem instellen en gebruiken	38
Handrem (optioneel) instellen	38
en gebruiken	38
Samenvouwen	39
Reiniging onderhoud	39
Opslag	39
Technische gegevens	40

Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit product zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen.

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd.

Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

Verwijdering

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan contact op met uw speciaalzaak of breng het product naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

Typeplaatje



1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar-maand)

Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik.

Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden. Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld. verkrijgbare accessoires vindt u bij uw speciaalzaak of op www.drivedevilbiss.de

Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen.

Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Slijtageonderdelen zijn (onder andere): wielen, remmen, handgrepen en armsteunen

Toegepaste normen

DIN EN 12183:2022 Spier aangedreven rolstoelen
Bestand tegen ontsteking volgens EN 1021-2:2014

Onderdelen van het product



Ecotec 2G

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------|
| 1. Duwgriep | 6. Voetenplank | 11. Hoepel |
| 2. Armsteun | 7. Na- en voorspoor van de voorwielen | 12. Rugkussen |
| 3. Ontgrendeling voor voetsteun | 8. Zwenkwiel voor | |
| 4. Voetsteun | 9. Parkeerrem | |
| 5. Hielband | 10. As voor snelle verwisseling (Quickpin) | |

Beoogd doel

Rolstoelen zijn uitsluitend bedoeld voor personen die niet of beperkt kunnen lopen, voor persoonlijk gebruik in het dagelijks leven, voortbewogen door de gebruiker zelf of door een begeleider, voor gebruik binnen en buiten op een vlakke, vaste ondergrond. Bij het verschaffen van een rolstoel moeten de lengte, het gewicht, de fysieke en mentale gesteldheid, leeftijd, leefomstandigheden en omgeving van de gebruiker in overweging worden genomen.

Indicatie | contra-indicatie

INDICATIE:

Verlies van loopvermogen of sterk verminderd loopvermogen en toch een essentiële behoefte om zich in het eigen huis te verplaatsen en het huis te verlaten voor een korte wandeling in de frisse buitenlucht of om plaatsen meestal dicht bij huis te bereiken voor alledaagse inkopen of bezigheden.

De rolstoel dient uitsluitend voor individueel gebruik door mensen met een verminderd of weggefallen loopvermogen, die zich hiermee zelf kunnen voortbewegen of zich door anderen kunnen laten duwen bij dagelijks gebruik, zowel binnenshuis als buitenshuis, op een stevige, horizontale ondergrond. Let bij de levering bovendien op lichaamslengte, gewicht, fysieke en psychische gesteldheid, leeftijd, woonomstandigheden en omgeving.

CONTRA-INDICATIE:

Het gebruik van deze rolstoel is niet geschikt bij:

- een beperkt gezichtsvermogen
- sterke evenwichtsstoornissen
- verlies van ledematen aan beide armen
- gewrichtscontracturen / beschadigde gewrichten aan beide armen
- onvermogen om te zitten

Geleverd product

1 x	Rolstoel
1 x	Toolkit
1 x	Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Voor een correcte en veilige bediening verzoeken wij u de volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht te nemen:

Stabiliteit en evenwicht

Uw rolstoel is zo ontworpen, dat deze de stabiliteit biedt die u bij normale dagelijkse activiteiten nodig hebt. Iedere beweging die u in de rolstoel maakt, is van invloed op

het zwaartepunt, wat in het ongunstigste geval tot kantelen van de rolstoel kan leiden. Voor extra veiligheid raden wij u aan, veiligheidsgordels te gebruiken.

Vanuit de stoel naar een voorwerp reiken

De grenzen van het evenwicht om een voorwerp te bereiken zijn vastgesteld met onderzoeken onder een representatieve groep rolstoelgebruikers.

Alleen de armen kunnen buiten de zitting van de rolstoel worden uitgestoken. De romp en het hoofd moeten binnen de grenzen van de zitting blijven.

Leun niet naar voren

Leun met uw borstkas niet over de armleuningen. Als u een voorwerp wilt bereiken dat zich vóór u bevindt, moet u voorover leunen en omlaag buigen. Daarom moet u de zwenkwielen gebruiken als hulpmiddelen (door deze naar voren te richten) om uw stabiliteit en evenwicht te bewaren. Het zorgvuldig richten van de wielen is essentieel voor uw veiligheid.

Leun niet naar achteren

Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk bij het gewenste voorwerp, zodat u er gemakkelijk bij kunt door uw arm uit te strekken terwijl u in een normale houding in de stoel blijft zitten. Leun in geen geval te ver naar achteren, want dan zou de stoel kunnen kantelen.

Zijwaartse verplaatsing

U kunt zelfstandig ergens anders gaan zitten als u beschikt over voldoende lenigheid en spierkracht. Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk bij de plaats waar u wilt gaan zitten en zorg dat de zwenkwielen naar voren zijn gericht. Zet de parkeerremmen van de achterwielen vast.

Gebruik indien mogelijk een plank om van de ene naar de andere zitplaats te gaan.

Verplaatsing naar voren

Als u in staat bent op te staan, kunt u naar voren gaan om op een andere plaats te gaan zitten. Als deze beweging voor u moeilijk is, is ondersteuning van een begeleider of een verpleger aanbevolen voor een zo eenvoudig en veilig mogelijke verplaatsing.

Zet de beide remmen vast en zorg ervoor dat de beide zwenkwielen naar voren zijn gericht. Let er daarbij op dat u bij uw verplaatsing in geen geval op de remmen mag leunen. Pak dan de greep van de armleuningen stevig vast, steun op uw armen om u een beetje op te richten, en vervolgens kan uw begeleider u helpen bij de voltooiing van uw verplaatsing. Plaats uzelf zo dicht mogelijk bij de plaats waar u wilt gaan zitten.

Ga bij uw verplaatsing zo ver mogelijk naar achteren op de zitting van uw rolstoel zitten om te voorkomen dat het zitkussen beschadigd raakt of dat de rolstoel naar voren kantelt.

Zet de twee remmen vast. De remgrepen mogen in geen geval worden gebruikt voor ondersteuning van uw plaatsverwisseling. Steun nooit op de voetenplanken wanneer u uit de rolstoel opstaat.

Als u in staat bent om te staan en als uw bovenlichaam sterk en lenig genoeg is, kunt u zelf naar voren buigen en u naar de andere zitplaats verplaatsen. Vouw de vo-

etenplank op en draai de voetsteun/beensteun opzij om de weg vrij te maken. Buig uw lichaam naar voren terwijl u op de twee armleuningen steunt en richt u op. Vervolgens schuift u uw lichaam in de richting van de plaats waar u wilt zitten terwijl u uw gewicht verdeelt over uw armen en handen.

Hindernissen overwinnen met een begeleider

Zo komt u op de stoep

Uw begeleider plaatst de rolstoel vooruit rijdend voor de stoep. Hij/zij kantelt de rolstoel naar achteren tot de zwenkwielen het voetpad bereiken, duwt de rolstoel naar voren totdat de achterwielen tegen de stoeprand staan en duwt de rolstoel verder tot de achterwielen over de stoeprand rijden.

Van de stoep afrijden

Uw begeleider plaatst de rolstoel voorwaarts met de zwenkwielen aan de stoeprand en kantelt de rolstoel naar achteren naar zich toe. Vervolgens duwt hij/zij de rolstoel voorzichtig naar voren, tot de achterwielen de weg raken, daarna laat hij/zij de zwenkwielen weer rustig op de grond komen.

Trappen overwinnen

Omdat het overwinnen van trappen moeilijk is, wordt inzet van twee begeleiders aanbevolen: één begeleider voor de rolstoel en één erachter bij de duwgrep. De begeleider die achter de rolstoel staat, kantelt de rolstoel naar achteren naar zich toe, waarbij hij de duwgrep stevig vasthoudt. De begeleider aan de voorkant van de rolstoel houdt de zijframes aan de voorkant stevig vast en tilt de stoel over de treden, terwijl de andere begeleider één voet op de volgende trede plaatst en de eerste beweging herhaalt.

Laat de zwenkwielen van de rolstoel niet zakken voordat de begeleider aan de voorkant van de rolstoel de laatste trede heeft beklommen. De trap afdalen gaat op dezelfde wijze, maar dan in omgekeerde volgorde.

Probeer de rolstoel nooit op te hijsen aan verwijderbare onderdelen (zoals de armleuningen, beensteunen of voetsteunen). Vermijd het gebruik van een roltrap.

Op eigen kracht rijden op hellingen

Het is raadzaam hellingen met een stijging van meer dan 9° te vermijden. Bij sterkere stijgingen is er een risico dat de rolstoel omvalt wanneer de wielen doordraaien of bij scheef over de helling rijden.

Hellingen oprijden

Buig uw bovenlichaam naar voren en draai de hoepels met snelle rukken om een passende snelheid te bereiken. Wanneer u wilt stoppen om onderweg uit te rusten, gebruik dan altijd de beide remmen tegelijkertijd.

Hellingen afrijden

Buig uw bovenlichaam naar achteren en stuur via de hoepels, die door uw handen glijden, de snelheid en richting.

Vermijd plotselinge veranderingen van richting en probeer nooit een helling diagonaal op of af te rijden. Pro-

beer de rolstoel ook niet tijdens het oprijden te draaien. De rolstoel is niet geschikt als stoel waarin u een auto bestuurt.

Let op het toegestane maximale gewicht van de gebruiker. Deze informatie vindt u in de technische gegevens in deze bedieningshandleiding en op het typeplaatje.

Risico van vastlopen

Rolstoel heeft bewegende delen.

Er bestaat gevaar voor beknelling bij het maken van aanpassingen en instellingen aan de rolstoel.

Bescherm het product tegen zonnestraling

Onderdelen van het product kunnen warm worden en bij aanraking huidletsel veroorzaken.

Ieder ernstig voorval dat in verband met het product optreedt, moet worden gemeld bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat, waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Vervoer in motorvoertuigen voor het vervoer van personen met beperkte mobiliteit (KMP)

Of uw rolstoel is goedgekeurd als zitplaats in een motorvoertuig voor het vervoer van personen met een



mobilitaatsbeperking (KMP) kunt u zien aan het haaksymbool (afb. 1) op de rolstoel of lezen in deze gebruiksaanwijzing, hoofdstuk Vervoer in motorvoertuigen voor het vervoer van personen met een mobilitaatsbeperking (KMP).

Vervoer

Alle rolstoelen die door Drive DeVilbiss zijn goedgekeurd als zitplaats in voertuigen zijn getest volgens ISO 7176 19. De tests volgens ISO 7176-19 werden uitgevoerd met de bevestigingssystemen van AMF-Bruns. De correcte montage van het bevestigingssysteem is een voorwaarde voor het veilige vervoer van de producten in het KMP en de basis voor de vrijgave. Bevestigingspunten op het bevestigingssysteem (zie installatiehandleiding AMF Bruns) De AMF-Bruns bevestigingssystemen leveren de krachtknooppunten voor de bevestiging van de producten in de KMP. De producten mogen alleen aan deze krachtknooppunten worden bevestigd voor het vastzetten in de KMP.

De persoon die verantwoordelijk is voor het vervoer moet bekend zijn met de geldende voorschriften voor het vervoer en met de werking van het KMP en het bevestigingssysteem. Voor het vastzetten van de rolstoel moeten aan het voertuig verankerde vierpunts bevestigingssystemen worden gebruikt.

Klaarmaken voor gebruik

Wielen aanbrengen en uitvouwen

Druk op de ontgrendelknop in het midden van de naaf om de hoepelwielen op de daartoe bestemde steunen op het varioblok vast te drukken. Zorg dat het wiel na plaatsing goed is vergrendeld en controleer dit door het wiel naar de buitenzijde te trekken. (afb. 2+3). Vouw de rolstoel vervolgens uit door op de zitting te drukken tot deze voelbaar vastklikt.



Voetsteunen aanbrengen

Breng de twee voetsteunen aan zoals in de afbeelding en zwenk deze naar binnen tot ze hoorbaar vastklikken (afb. 4). Als u de voetsteunen wilt ontgrendelen, trekt u de hendel naar boven en zwenkt u de voetsteun opzij naar buiten (afb. 5).



Voetsteunen nooit naar binnen wegzwenken!


Lengte-instelling van de voetsteunen

Lengte-instelling (afb. 6)
Draai de schroef aan de achterzijde van de voetsteun (zie cirkel) los en verwijder hem en stel de lengte naar wens in door verschuiven naar boven of naar onderen. Controleer waar het draadgat zit en breng de borgschroef weer aan. **Draai de schroef weer vast!**



Zithoogte instellen (wielophanging achter)

De zithoogte kan in trappen worden ingesteld. Als u de hoogte wilt verstellen, drukt u op de ontgrendelingsknop om de beide hoepelwielen te verwijderen (zie het gedeelte Wielen aanbrengen). Open de moer van de wielsteun en verplaats deze naar de gewenste opening. Plaats de moer met de borgring weer terug en haal deze aan (afb. 7).

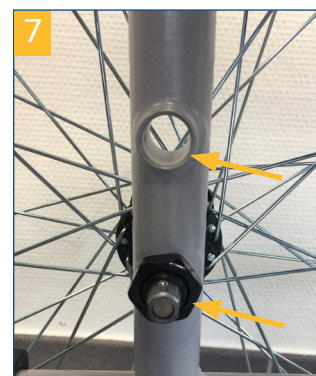

Verzekert u ervan dat de wielas stevig is aangehaald!

Zithoogte instellen (wielophanging voor)

De zithoogte voor is in trappen instelbaar en wordt in overeenstemming met de gewenste hoek van de zitting ingesteld. Als u de hoogte wilt verstellen, opent u de schroef van de wielas en trekt u deze eruit.



De afsluitingen van de verschillende openingen zijn gemakkelijk te verwisselen. Zet het wiel nu in de gewenste positie, breng de schroef van de wielas weer aan en draai deze vast (afb. 8).

Verzekert u ervan dat de wielas stevig is aangehaald!

Armleuningen instellen en verwijderen

Bij levering zijn de armleuningen al op de rolstoel gemonteerd. De armsteunen kunnen worden vervangen. Afhankelijk van de bestelling kunnen de armsteunen als korte of lange armsteun (afb. 9+10) worden ingesteld. Voor het instellen draait u de schroeven aan de onderkant los en verstelt u de armleuning in de gewenste positie.

Draai de schroef weer vast!



U kunt de armleuning naar achteren zwenken door de ontgrendelingshendel aan de voorkant van de armleuning te bedienen en deze ingedrukt te houden terwijl u gelijktijdig de armleuning omhoog trekt, totdat de armleuning vrij is. Vervolgens kunt u de armleuning naar achteren wegzwenken (afb. 11+12).



Controleer altijd of de parkeerrem is vergrendeld door te proberen of u de rolstoel kunt bewegen.


Voor een gemakkelijke transfer uit en in de rolstoel kan de bedieningshendel van de parkeerrem worden omgeklapt. (afb. 17+18). Trek hiervoor de hendel naar boven en klap hem daarna om.



Parkeerrem instellen en gebruiken

Bij levering is de parkeerrem volgens de configuratietoestand correct ingesteld. Als u de wielpositie hebt gewijzigd, moet de instelling van de remmen eventueel ook worden gewijzigd.

Daartoe draait u de beide schroeven aan de onderzijde van de betreffende rem (afb. 13) los en verschuift u de hele eenheid over de geleider zo dat er 12 mm afstand is tussen de rembout en de band (afb. 14). Haal vervolgens de beide schroeven weer aan, zodat de parkeerrem optimaal is ingesteld.

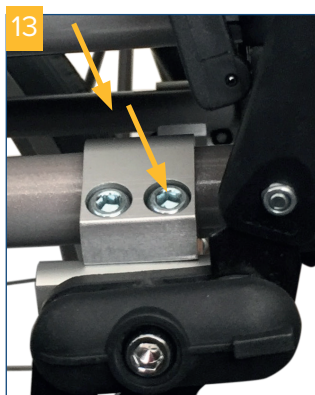


Controleer of alle schroeven zijn teruggeplaatst en zijn aangehaald!

Voor het gebruik van de parkeerrem drukt u de remhendel krachtig naar voren tot deze voelbaar vastklikt, nu is de parkeerrem geactiveerd (afb. 15).

Om de parkeerrem los te zetten, trekt u de remhendel weer naar u toe, hierdoor wordt de parkeerrem ontgrendeld (afb. 16).

Handrem (optioneel) instellen en gebruiken

Bij levering is de optionele handrem voor de begeleider correct ingesteld. Als de remwerking te gering is, kan deze worden vergroot door de stelschroef naar buiten te draaien en verkleind door de stelschroef naar binnen te draaien (afb. 19).

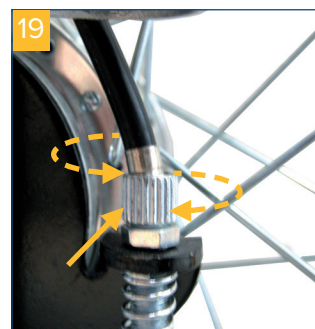

Maak voor het instellen eerst de contramoer los en voer vervolgens de betreffende instelling uit. Let er goed op dat u de contramoer daarna weer vastdraait, houd daarbij met een tang de stelschroef vast. Als de begeleider de rolstoel moet afremmen, trekt hij/zij aan de grepen van de beide remgrepen.

Wilt u de remmen vastzetten (bijvoorbeeld om te parkeren), dan kunt u de remgrepen vergrendelen in de remstand door de vergrendelingsklep met een vinger naar voren te drukken tot deze vastklikt. Wanneer u de rem weer wilt ontgrendelen, drukt u aan de achterkant op de vergrendelingsklep (afb. 20+21).



Als u wegloopt van een rolstoel waarop iemand zit, is het van het grootste belang dat u ook de parkeerrem activeert.

Samenvouwen

Voor transportgemak of om de rolstoel op te bergen in een auto kan de rolstoel met één handbeweging worden samengevouwen. Daartoe verwijdert u eerst het optionele zitkussen en de voetsteunen, vervolgens pakt u de beide grijplussen aan de zijkant van de zittingbekleding en trekt u de rolstoel omhoog.

Reiniging | onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- en azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60°C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna, enz.).
- Neem bij defecten contact op met de speciaalzaak waar u dit product hebt gekocht.
- Controleer regelmatig de staat van de banden. Deze zijn 'lekkagevrij', met andere woorden, u hoeft geen bandenspanning te controleren of banden op te pompen. Controleer de banden wel altijd op scheurtjes of andere beschadigingen.
- Controleer voor het rijden banden, remmen, frame en andere slijtdelen op schade en slijtage. Kleine reparaties zoals het afstellen van de remmen kunnen zonder gereedschap worden uitgevoerd.
- Reparaties en inspecties moeten worden uitgevoerd door getraind personeel bij de dealer.
- Wij adviseren de rolstoel jaarlijks door een vakhandelaar te laten keuren. In geval van storingen of defecten aan de rolstoel moet deze onmiddellijk ter reparatie worden overgedragen aan de vakhandel. De reparatie en vervanging van onderdelen wordt door de vakhandel uitgevoerd. Op verzoek ontvangt de vakhandel de nodige informatie en documenten voor reparatie en onderhoud. Voor de vakhandel is een opleidingsprogramma beschikbaar.
- Reserveonderdelen kunnen worden gekocht in onze onderdelencatalogus op onze homepage.

Opslag

Als de rolstoel langere tijd niet wordt gebruikt, moet hij worden gereinigd, opgevouwen en opgeborgen in de originele kartonnen doos.

Technische gegevens

Product	Standard rolstoel Ecotec 2G			
Zitbreedte	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm
met trommelrem	910350100	910350200	910350300	910350400
Totale breedte met TR	590 mm	630 mm	670 mm	710 mm
Breedte samengevouwen	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Gewicht	19,6 kg	19,8 kg	20 kg	20,2 kg

Product	Standard rolstoel Ecotec 2G			
Zitbreedte	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm
zonder trommelrem	910300100	910300200	910300300	910300400
Totale breedte zonder TR	565 mm	605 mm	645 mm	685 mm
Breedte samengevouwen	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Gewicht	18,6 kg	18,8 kg	19 kg	19,2 kg

Technische gegevens algemeen	
HMV-nr.	18.50.02.0131
Totale lengte met voetsteun	1070 mm
totale hoogte	900 - 955 mm
Zitdiepte	420 mm
stoelhoogte	490 - 540 mm
rugleuning hoogte	430 mm
Lengte voetensteun	360 mm - 480 mm
Dimensies voorwielen	200 x 50 mm lekbestendig
Afmetingen aandrijf wiel	24" x 1 3/8", lekbestendig
minimaal draaicirkel	R495 mm, R700 mm
maximum stuurbereik	1300 mm
Kantelhoek van de stoel	4,2°
Hellingshoek rugleuning	15°
Afstand tussen voetsteun en zitting	355 mm - 475 mm
hoek tussen been en zitting	110°
Afstand tussen armleuning en zitting	232 mm
positie van de voorkant uiteinde van de armleuning	335 mm
Diameter greepwiel	530 mm
materialen frame	Staal, gepoedercoat, corrosiebestendig
Materiaal armleuning	PUR
Materiaal rugleuning bekleding	Nylon, PUR-schuim
Maximale belasting	130 kg

Het product is getest volgens ISO 7176-8.

[illegible]