

Inhoudsopgave

Voorwoord	15
Verklaring van overeenstemming	15
Levensduur	15
Verwijdering	15
Typeplaatje	15
Hergebruik.....	15
Garantie	15
Onderdelen van het product.....	16
Beoogd doel.....	16
Indicatie	16
Geleverd product.....	16
Veiligheidsinstructies	16
Openvouwen.....	17
Hoogte-instelling van de voetjes	17
Lopen	17
Reiniging onderhoud	17
Technische gegevens.....	17

Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit product zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen.

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd.

Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

Verwijdering

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan contact op met uw speciaalzaak of breng het product naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

Typeplaatje



1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar-maand)

Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik.

Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden.

Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Verkrijgbare accessoires vindt u bij uw speciaalzaak of op **www.drivedevilbiss.de**

Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen.

Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Slijtageonderdelen zijn (onder andere):
rubberen voetjes, handgreep

Onderdelen van het product



Gecko

1. Handgreep
2. Verstelbare voet
3. Rubberen voetje

Beoogd doel

Looprekken worden gebruikt om veiliger te kunnen lopen, en kunnen, afhankelijk van het ontwerp, ook worden gebruikt om druk te verlichten. Sommige producten zijn voorzien van accessoires of mandjes waarin artikelen kunnen worden meegenomen. Deze looprekken kunnen worden opgevouwen om transport te vergemakkelijken, en de handvatten zijn in hoogte verstelbaar.

Indicatie

INDICATIE:

Belemmering van de mobiliteit bij aantasting van beweging/coördinatie/evenwicht - maar nog voldoende behoud van loopvermogen, wanneer het gebruik van andere loophulpen niet voldoende is. Behoud/bevordering van het vermogen om veilig te kunnen lopen en staan (looptraining).

CONTRA-INDICATIE:

Gebruik van het product wordt afgeraden bij: waarnemingsstoornissen, sterke evenwichtsstoornissen, onvermogen om vrij te kunnen staan.

Geleverd product

1 x	Looprek
1 x	Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies


- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig.
- Controleer vóór ingebruikname of alle onderdelen stevig vastzitten en niet zijn beschadigd. Gebruik het product niet als het defect is!
- Gebruik het product alleen als hulpmiddel bij het lopen!
- Gebruik het product alleen op een vlakke, stevige ondergrond.
- Let op het toegestane maximale gewicht van de gebruiker. Deze informatie vindt u in de technische gegevens in deze bedieningshandleiding en op het typeplaatje.
- Gebruik op roltrappen e.d. is uitdrukkelijk verboden!
- Hang geen tassen aan de grepen – kantelgevaar!

- Bij het uitvouwen / samenvouwen van het product kunnen kleding en lichaamsdelen bekneld raken.
- Bescherm het product tegen zonnestraling. Onderdelen van het product kunnen warm worden en bij aanraking huidletsel veroorzaken.
- Voor elk gebruik van dat uw product in goede staat verkeert en dat alle verstelbare onderdelen goed zijn bevestigd.
- Controleer regelmatig de schroeven op het product en draai deze indien nodig aan!
- Ieder ernstig voorval dat in verband met het product optreedt, moet worden gemeld bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat, waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Openvouwen

Zet de loophulp in opgeklapte toestand voor het lichaam. Klap de loophulp aan de handgrepen uit elkaar tot de vergrendeling aan de telescoopstang vastklikt. Controleer de vergrendeling.

Hoogte-instelling van de voetjes

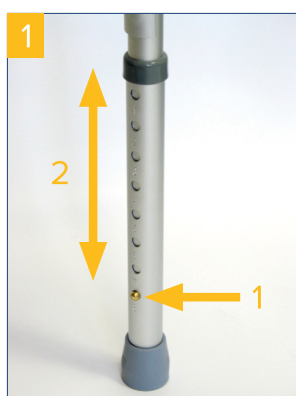

Stel de gewenste hoogte in voordat u het product gebruikt. Verstel de poten als volgt in hoogte: Druk op de knop (1) en trek de poot tegelijkertijd naar buiten of schuif deze in tot de knop vastklikt in de gewenste positie (2).

Controleer of de drukknop goed is vergrendeld. Controleer of alle vier stoelpoten op dezelfde hoogte zijn ingesteld.

Lopen

Gecko starr:

Zet de loophulp tijdens het lopen niet te ver naar voren. Zet de loophulp altijd recht neer op alle vier poten.

Maak kleine pasjes naar de loophulp toe en houd daarbij de handgrepen vast. Zorg dat u stevig staat als u de loophulp verzet.

Dwars op de looprichting kantelt de loophulp bij een schuine stand van meer dan 3,5°.

Maak pas een nieuwe pas als het looprek stevig staat.

Gecko reziprok:

Til het looprek aan een handgreep iets op. Verplaats de twee voetjes naar voren en zet ze weer neer. Dan maakt u een pas achter het looprek aan. Vervolgens herhaalt u dit aan de andere kant.

Reiniging | onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- en azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60°C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna, enz.).
- Neem bij defecten contact op met de speciaalzaak waar u dit product hebt gekocht.

Technische gegevens

Product	Gecko starr	Gecko reziprok
Artikelnummer	700100100	700100200
HMV-nr.	10.46.01.0026	10.46.01.1014
Totale lengte	48 cm	43,5 cm
Totale breedte	67,5 cm	64,5 cm
Breedte tussen handgrepen	44 cm	44,5 cm
Hoogte handvat	80 - 98 cm	80,5 - 98,5 cm
Breedte tussen de staanders achter	63,5 cm	60,5 cm
Breedte tussen de staanders voor	56,5 cm	55,5 cm
Afmetingen samengevouwen	67,5 x 12 x 80 cm	64,5 x 12 x 80,5 cm
Gewicht	2,4 kg	2,7 kg
Max. belasting	120 kg	100 kg
Framemateriaal	Aluminium, PVC, rubber	Aluminium, PVC, rubber, staal