

## Inhoudsopgave

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Voorwoord .....                              | 21 |
| Verklaring van overeenstemming .....         | 21 |
| Levensduur .....                             | 21 |
| Verwijdering .....                           | 21 |
| Typeplaatje .....                            | 21 |
| Hergebruik .....                             | 21 |
| Garantie .....                               | 21 |
| Onderdelen van het product .....             | 22 |
| Beoogd doel .....                            | 23 |
| Indicatie .....                              | 23 |
| Geleverd product .....                       | 23 |
| Veiligheidsinstructies .....                 | 23 |
| Openvouwen .....                             | 23 |
| Montage accessoires .....                    | 24 |
| Hoogteverstelling duwgrepes .....            | 24 |
| Rem instellen .....                          | 24 |
| Remmen / parkeren .....                      | 24 |
| Zitten .....                                 | 25 |
| Samenvouwen   transporteren   opbergen ..... | 25 |
| Reiniging   onderhoud .....                  | 25 |
| Technische gegevens .....                    | 25 |

## Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit product zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen.

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

## Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

## Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd.

Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

## Verwijdering

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan contact op met uw speciaalzaak of breng het product naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

## Typeplaatje



1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar-maand)

## Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik.

Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden.

Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Verkrijgbare accessoires vindt u bij uw speciaalzaak of op [www.drivedevilbiss.de](http://www.drivedevilbiss.de)

## Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen.

Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

### UITSLUITING VAN GARANTIE

Slijtageonderdelen zijn (onder andere): wielen, remmen en handgrepen

## Onderdelen van het product



## CRISTALLO

- |              |                |                                     |
|--------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. Handgreep | 6. Mand        | 11. Opvouwbeveiliging               |
| 2. Rem       | 7. Voorwiel    | 12. Vergrendelhendel voor duwgrepen |
| 3. Duwgriep  | 8. Frame       | 13. Bowdenkabel                     |
| 4. Dienblad  | 9. Achterwiel  |                                     |
| 5. Zitting   | 10. Stokhouder |                                     |

## Beoogd doel

Looprekken worden gebruikt om veiliger te kunnen lopen, en kunnen, afhankelijk van het ontwerp, ook worden gebruikt om druk te verlichten. Vierwielige looprekken bestaan uit een buizenframe met vier massieve rubberen wielen. Deze looprekken zijn zodanig ontworpen dat de gebruiker altijd tussen de contactpunten of wielen beweegt. Deze looprekken zijn voorzien van remsystemen die vanaf de handvatten via Bowdenkabels worden bediend. Deze looprekken kunnen worden opgevouwen om transport te vergemakkelijken, en de handvatten zijn in hoogte verstelbaar.

## Indicatie

### INDICATIE:

Loophulp voor buiten en binnen ter ondersteuning of verbetering van beperkte mobiliteit. De verstrekking van een loophulp aan een verzekerde moet als doel hebben de beperkte mobiliteit bij de gebruiker te compenseren of toch ten minste te verbeteren (uitbreiding van de actieradius / mobiliteit). Voor personen met beperkingen in de hand-/armfuncties is een speciale afstelling/uitvoering van de grepen of hand-/armsteunen nodig. Voor personen met evenwichtsstoornissen zijn verrijdbare loophulpen mogelijk niet geschikt, dit moet in afzonderlijke gevallen worden getest door te proberen. Eventueel moet een begeleider aanwezig zijn. De rollator mag alleen bij normale, dagelijkse bezigheden gebruikt worden.

### CONTRA-INDICATIE:

Gebruik van de rollator wordt afgeraden bij: waarnemingsstoornissen, sterke evenwichtsstoornissen, onvermogen om te zitten.

## Geleverd product

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 1 x | Rollator           |
| 1 x | Mand               |
| 1 x | Dienblad           |
| 1 x | Stokhouder         |
| 1 x | Gebruiksaanwijzing |

## Veiligheidsinstructies

- Gebruik de rollator alleen als hulpmiddel bij het lopen.
- Gebruik de rollator alleen op een vlakke, stevige ondergrond.
- Gebruik de rollator niet als stoel in voertuigen zoals bussen of treinen!
- Het is niet toegestaan op de rollator te staan of personen of dieren op de rollator te vervoeren.

- Let op het toegestane maximale gewicht van de gebruiker. Deze informatie vindt u in de technische gegevens in deze bedieningshandleiding en op het typeplaatje.
- Gebruik het dienblad alleen voor kleine, lichte voorwerpen die niet scherp of heet zijn. Max. belasting: 5,0 kg
- Gebruik de mand alleen voor transport van voorwerpen en belast deze niet te zwaar! Max. belasting: 5,0 kg
- Gebruik op roltrappen e.d. is uitdrukkelijk verboden!
- De duwgrepen moeten altijd parallel aan de looprichting ingesteld zijn – kantelgevaar!
- Hang geen tassen aan de grepen – kantelgevaar!
- Maak op hellende wegen gebruik van de bedrijfsrem (trek de remhendel naar boven).
- Als u te zwaar op de handgrepen leunt, kan de rollator naar achter kantelen.
- Bij het uitvouwen / samenvouwen van de rollator kunnen kleding en lichaamsdelen bekneld raken.
- Bescherm de rollator tegen zonnestraling. Onderdelen van het product kunnen warm worden en bij aanraking huidletsel veroorzaken.
- Vergewis u er voor elk gebruik van dat uw rollator in goede staat verkeert en dat alle verstelbare onderdelen goed zijn bevestigd. Controleer of de remmen goed werken!
- Controleer vóór gebruik van de rollator of de opvouwbeveiliging goed is vergrendeld.
- Controleer regelmatig de schroeven op de rollator en draai deze indien nodig aan!
- De remmen kunnen minder goed gaan werken wanneer de wielen afslijten. Controleer daarom regelmatig de remwerking en de banden.
- De rollator mag NIET aan de zitting, aan afneembare onderdelen of aan de remkabels gedragen worden.
- Ieder ernstig voorval dat in verband met het product optreedt, moet worden gemeld bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat, waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

## Openvouwen



Zet de rollator op de wielen. Trek aan een van de stangen van een achterwiel om het onderstel open te vouwen (1).

Druk de dwarsstang recht omlaag (2) tot deze makkelijk vastklikt.

Draai de beweegbare vouwbeveiliging (3) tegen de aanslag (3) zodat deze

verticaal ten opzichte van de dwarsstang staat (afb. 1).

## Montage accessoires



Hang de mand aan de haakjes aan de voorkant onder de zitting en plaats de voetjes van het dienblad in de kleine openingen aan de bovenkant van de zitting (afb. 2).

## Hoogteverstelling duwgrepen





Steek de duwgrepen minstens tot de markering 'MAX' in de buis van het frame (afb. 3).

Draai de vergrendelhendel rechtsom om de handgrepen op de gewenste hoogte vast te zetten.

Stel beide grepen in op dezelfde hoogte.

De duwgrepen moeten parallel aan de looprichting ingesteld zijn!

**⚠ De maximaal toegestane hoek tussen lengtemiddenlijn van de greep en de bewegingsrichting bedraagt 0°**

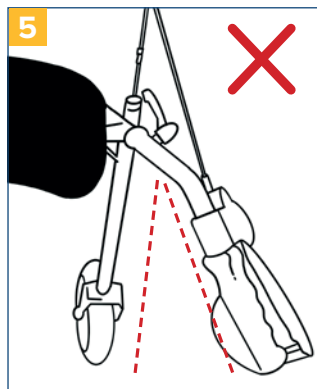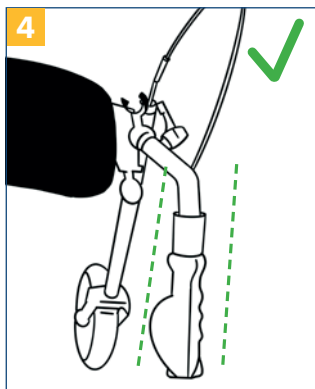

De stand van de vergrendelhendel zelf kan door gelijktijdig trekken en draaien worden gewijzigd. Als u de hoogte van de duwgrepen wilt aanpassen, draait u de vergrendelhendel linksom om de vergrendeling los te zetten. Zet de grepen vervolgens op de gewenste hoogte vast zoals hierboven is beschreven.

## Rem instellen




Als de rem slecht of juist te krachtig werkt, kan de rem ofwel boven aan de remhouder (afb. 6) of aan de stelschroef onder aan de bowdenkabel (afb. 7) op de gewenste remwerking worden ingesteld.

De rem is correct ingesteld als de remhendels en de remkabels geen speling hebben en de wielen bij een losgezette rem zonder sleepgeluiden gedraaid kunnen worden.

## Remmen / parkeren

Als u tijdens het lopen met de rollator wilt remmen, trekt u beide remgrepen met de handen omhoog (afb. 8). Rem altijd langzaam en gelijkmatig met beide handen.

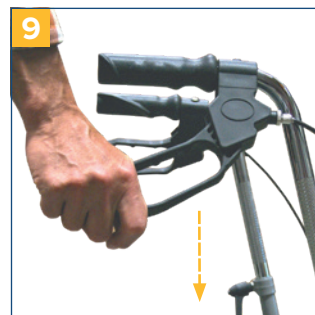

Als u de rollator wilt vastzetten/parkeren, drukt u beide remgrepen omlaag totdat deze hoorbaar vastklikken (afb. 9)! U ontgrendelt de remmen door de beide remgrepen weer omhoog te trekken totdat deze zijn ontgrendeld (de remgrepen staan in de middelste stand).

De remmen kunnen minder goed gaan werken wanneer de banden afslijten. Controleer daarom regelmatig of de rollator goed remt.

## Zitten

Plaats de rollator op een vlakke, stevige ondergrond. Vergrendel vervolgens de remmen. De rollator moet stabiel staan en mag niet wegglijden. Blijf rechtop zitten, leun niet naar achteren (**afb. 10**)!

Alleen zitten zoals in de afbeelding, met uw rug naar de looprichting, is toegestaan (**afb. 11**)!



## Samenvouwen | transporteren | opbergen

Als u de rollator wilt samenvouwen, opent u de opvouwbeveiliging (**afb. 12**) en trekt u de zitting en de rollator omhoog. Kantel de rollator tegen de looprichting in omhoog naar achteren, zodat het frame wordt ingevouwen (**afb. 13+14**). De rollator kan vervolgens worden voortgetrokken, vervoerd of opgeborgen.

**Verwijder accessoires indien van toepassing!**



## Reiniging | onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- en azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60° C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna etc.)!
- Neem bij defecten contact op met de speciaalzaak waar u dit product hebt gekocht!
- Controleer regelmatig de staat van de banden. Deze zijn 'lekkagevrij', met andere woorden, u hoeft geen bandenspanning te controleren of banden op te pompen. Controleer de banden wel altijd op scheurtjes of andere beschadigingen.

## Technische gegevens

| Product                        | Cristallo                 |
|--------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                  | 722100000                 |
| HMV-nr.                        | 10.50.04.1114             |
| Totale lengte                  | 67 cm                     |
| Totale breedte                 | 61 cm                     |
| Totale hoogte                  | 100 cm                    |
| Greephoogte                    | 79 - 100 cm               |
| Breedte tussen handgrepen      | 43 cm                     |
| Zitbreedte                     | 38 cm                     |
| Zitdiepte                      | 16 cm                     |
| Zithoogte                      | 61 cm                     |
| Breedte tussen de achterwielen | 41 cm                     |
| Afmetingen samengevouwen       | 26 x 61 x 86 cm           |
| Gewicht met accessoires        | 9,8 kg                    |
| Max. belasting                 | 130 kg                    |
| Framemateriaal                 | Stalen buizen met coating |