



FlexSupport Handleiding



Conformiteit

Dit hulpmiddel voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen (MDR), Klasse I.



Inleiding

Bedankt dat u gekozen heeft voor de FlexSupport van EVIBO.

Dit kussen is ontworpen om laterale ondersteuning en comfort te bieden. Het is vervaardigd met een PU-hoes, een plastic rugstructuur en PU-schuim voor duurzaamheid en comfort. Het kussen is geschikt voor rolstoelen, relaxstoelen, thuisfauteuils, stoelen en andere zitvoorzieningen.

Bestemd gebruik

De FlexSupport is bedoeld voor gebruik als lateraal ondersteuningskussen bij personen met een beperkte rompbalans. Het ondersteunt de zijkanten van de romp bij het zitten op een zitvoorziening.

Gebruik dit product niet bij:

- Actieve decubitus of ernstige huidirritaties op de rug of flanken
- Ernstige wervelkolomaandoeningen zonder overleg met een behandelaar
- Bekende allergie voor polyurethaan (PU) of kunstleer
- Personen boven 120 kg lichaamsgewicht
- Situaties waarin het kussen kan verschuiven door ongecontroleerde bewegingen

Productcomponenten

- Rugdeel met 2 verstelbare klikgespen (achterkant anti-slip en voorzijde klittenband).
- Pelot rechts (onderzijde klittenband).
- Pelot links (onderzijde klittenband).

Gebruiksaanwijzing

1. Bevestig het rugdeel door middel van de klikgesp om de gewenste rugleuning en trek de banden strak aan. Dit kan eventueel verticaal of diagonaal. Kijk wat het beste aansluit bij de rugleuning van uw stoel.



2. Positioneer de pelotten met de klittenbandzijde op de rugleuning tussen de heupen en oksels.
LET OP: De geleidelijk aflopende zijde van de pelotten moet richting oksel wijzen.



3. Pas het kussen aan zodat het goed aansluit aan beide zijdes van uw romp. Zorg ervoor dat de vleugels uw zijden omarmen voor extra steun.



Reiniging

- Verwijder de PU-hoes door de rits te openen.
- Was de hoes in de wasmachine met een mild wasmiddel op maximaal 60°C.
- Maak de plastic rugstructuur en het PU-schuim schoon met een vochtige doek.

Veiligheidsvoorschriften

⚠ Belangrijk:

- Gebruik het kussen niet als speelgoed.
- Verkeerde plaatsing kan leiden tot onvoldoende of foutieve ondersteuning.
- Een loszittend kussen kan verschuiven en instabiliteit veroorzaken.
- Langdurig gebruik zonder houdingsaanpassing kan drukplekken veroorzaken.
- Slechte reiniging kan leiden tot ophoping van bacteriën of allergenen.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen.
- Houd het product uit de buurt van scherpe voorwerpen.

Mogelijke bijwerkingen

- Drukplekken bij langdurig gebruik zonder houdingswissel.
- Huidirritatie bij gevoeligheid voor gebruikte materialen.
- Verminderde stabiliteit bij verkeerd bevestigen.

Onderhoud

- Controleer regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging.
- Vervang het kussen bij vormverlies of beschadigde hoes.
- De verwachte levensduur van het product is 2 jaar bij normaal gebruik.

Opslag en gebruiksomstandigheden

- Bewaren bij kamertemperatuur tussen 5°C en 40°C.
- Beschermen tegen vocht en direct zonlicht.

Fabrikant en contactinformatie

Merkhouder en verantwoordelijke voor het op de markt brengen in de EU:

Adres: Evibo Medical
Rijksweg 10
5953 AE Reuver, Nederland

Website: www.evibo.nl

E-mail: info@evibo.nl

Gegevens product:



FlexSupport



MODEL: PU491840 Butterfly Embracing Wheelchair Lumbar Cushion



2025-06-07



20250607



120kgs



Company: Dongguan China Effort Healthcare Products Co., Ltd.
Address: 39th Jinyuan Road, Liaobu Town, Dongguan City Guangdong
Province, China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7 2909 VA Capelle aan den IJssel
Nederland



(01)8720892657404(11)250607(10)20250607