

GLIJLAKEN  
PW-0095  
95 x 205 cm

# Proturn®

HOOGWAARDIGE  
KWALITEIT  
GLIJLAKENS

Geschikt voor alle  
wentelsystemen

  
**GLISS**  
Quality Pro



- 100% hoogwaardig nylon
  - glad oppervlak
  - lage glijweerstand
- wentelen met minimale wrijving
  - minder kans wrijvingsplekken
  - wasbaar tot 95 °C.

**ato form**®  
voor meer levensvreugde

# Proturn®

## GLIJLAKEN



### Wasvoorschrift:

- 95 °C machinewas
- Drogen in droogtrommel op normale temperatuur
- Niet strijken
- Geen wasverzachter gebruiken

### Bevestigen:

Het glijlaken wordt als volgt aan het matras vastgemaakt:

- Vouw het glijlaken op het matras uit en leg het met de stiksels naar beneden
- Plaats het elastiek om de 4 hoeken van het matras
- Strijk het oppervlak van het glijlaken glad, zodat er geen plooien of vouwen in komen
- Bevestig de 4 klittenbandsluitingen aan de lange zijde van het glijlaken rond de verstelbare delen (lattenbodern) van het bed

### Let op:

Als het glijlaken niet op de juiste manier vastgemaakt is, zullen de banden en mogelijk het systeem samen met het bed worden beschadigd bij verstelling van het bed.



by turnAid  
[www.turnaid.dk](http://www.turnaid.dk)



### Meer informatie:

Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 - 77 34 214  
[www.ato-form.nl](http://www.ato-form.nl) | [info@ato-form.nl](mailto:info@ato-form.nl)

ato form®  
voor meer levensvreugde